

Endoskopická kamera

Při jejím používání mějte na paměti následující body:

1. Tento výrobek je vodotěsný, ale nelze jej dlouho namočit ve vodě. Účinek alkoholu je při čištění lepší.
2. Nejlepší ohnisková vzdálenost fotoaparátu je 1,4-2 cm.
3. Při používání produktu buďte opatrní, nedotýkejte se ušního bubínku.
4. Při používání si pozorně přečtěte pokyny.

Představení produktu:

Jedná se o HD vizuální nástroj pro čištění zvukovodů, který obsahuje mini kameru, jejíž průměr je 5,5 mm, a několik vyměnitelných doplňků, s vycpávkou do uší, lepicí ušní vycpávkou, ušní vycpávkou s vatovou tyčinkou, chrániče sluchu. Obrázky lze zobrazit a uložit do telefonu nebo počítače.

Použití na telefonu:

Nezbytné podmínky pro telefony: vyžaduje Android 4.2 nebo novější, mít a otevřít funkci OTG, přístup k externí kameře

Před použitím se ujistěte, že telefon zapne funkci OTG

USB OTG (On The Go) je standard USB, který dovoluje k mobilnímu zařízení snadno připojit USB periferie tím, že z něj udělá hostitelské zařízení, jako se to děje u počítačů nebo notebooků. K mobilům tak lze bez problémů připojit např. externí disky nebo i klávesnice, myši a další, což se hodí, jelikož chytré telefony jsou dnes často využívány i na práci. OTG je tedy odpovědí na častou otázku, jak připojit USB k mobilu.

Jak používat mobilní telefon Android:

1. Stáhněte si APP: vyhledejte fotoaparát Fi Aplikaci v Google Play Store, nebo naskenujte QR kód z přiložené brožurky, nebo zadejte:

URL: www.inskam.com/download/inskam.apk

2. Nainstalujte si APP do telefonu
3. Připojte produkt k telefonu a poté jej můžete používat.

Jak používat v systému Windows:

1. Zadejte adresu URL: www.inskam.com/download/camera.zip
a stáhněte si jednotku Smart Camera.
2. Nainstalujte jednotku do počítače.
3. Připojte produkt k počítači a otevřete jednotku Smart Camera. Tento produkt můžete začít používat.

Parametry produktu:

- Průměr kamery: 5,5 mm
- Pixely fotoaparátu: 300 000 / 1,3 milionu
- Vodotěsnost: IP67
- Osvětlení: 6 LED
- Metoda čištění: Otřete alkoholem

Příslušenství:

Endoskopická kamera s kabelem, kolečko +/-, koncovka USB/ micro USB s redukcí USB typu-C, špunty do uší 4x, lepidlo špunty do uší 4x, kroužky do uší 2x, bavlněná tyčinka 4x, čisticí hadřík 1x, ochranný kryt kamery 1x, gumové pouzdro 5x